

SCHEMAT MONTAŻOWY

AQUANESIS BP

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA




CE

0197

Wersja II z dnia 06.06.2017r.

Wymiary na rysunkach podane są w milimetrach. Przygotowując przyłącza wanny należy pamiętać, żeby pozostawić swobodny dostęp do urządzenia min 60 cm z każdej strony (konieczne do montażu oraz obsługi serwisowej wanny). W przypadku nie zachowania takich odległości nabywca musi liczyć się z ew. dodatkowymi kosztami demontażu i powtórnego montażu wanny przez serwis, w przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej.

Rys. 1

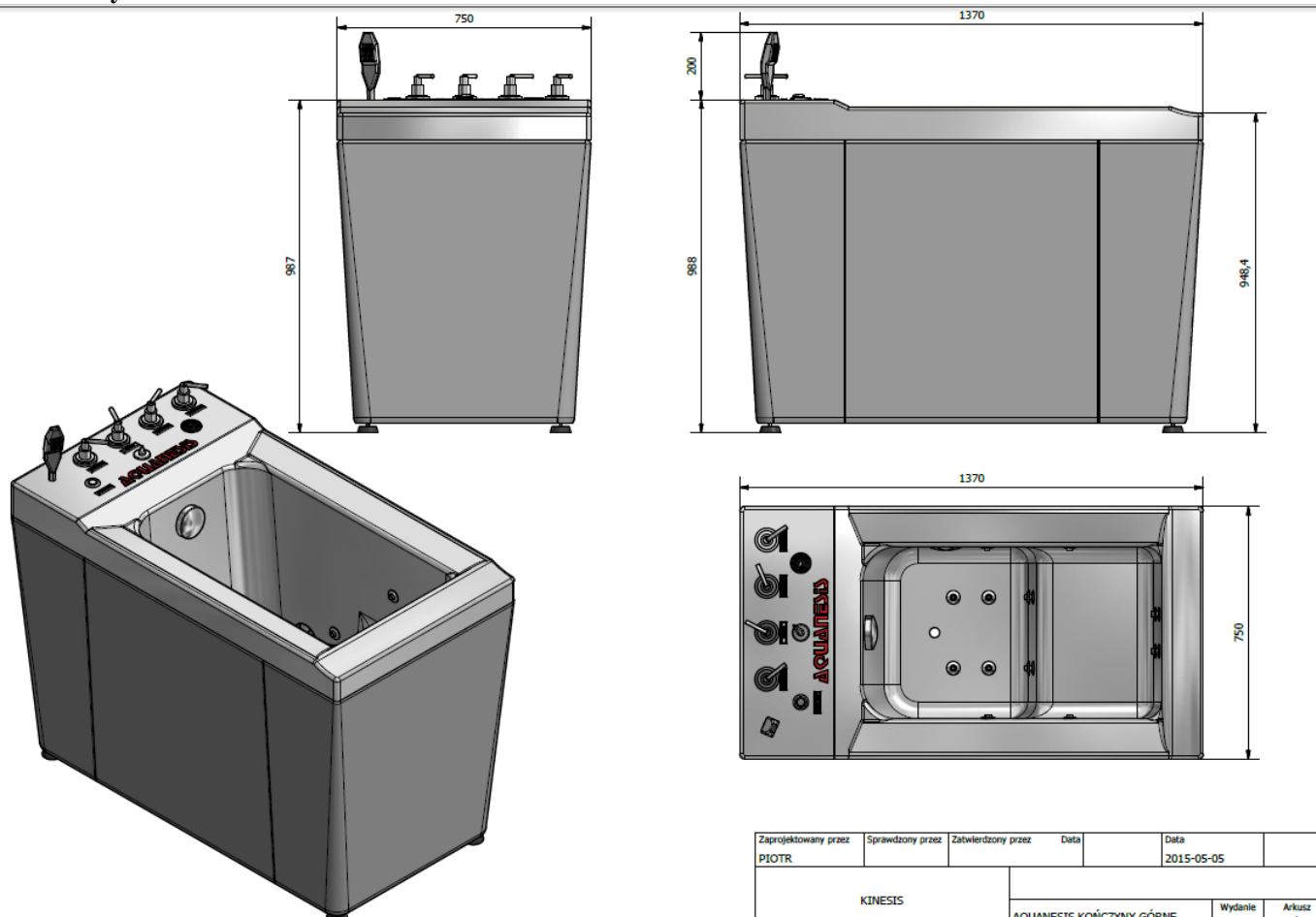


WYMAGANIA TECHNICZNO-MONTAŻOWE PO STRONIE KUPUJĄCEGO:


W celu zapewnienia prawidłowego montażu i funkcjonowania wanny należy:

1. zapewnić zasilanie w bieżącą zimną oraz ciepłą wodę (z sieci wodociągowej)
2. przygotować przyłącza wodne zimnej i ciepłej wody poprowadzone rurą o średnicy 3/4", zakończone zaworem odcinającym z gwintem zewnętrznym M3/4" max. 100mm nad powierzchnią podłogi. Zainstalować filtry mechaniczne np. „sznurkowe” - filtry powinny być zainstalowane w miejscu dostępnym, umożliwiającym łatwą wymianę wkładów, na rurach doprowadzających wodę do pomieszczenia z wanną. Aby zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi odpływ powinien być syfonowany w części podłogowej.
3. przygotować zasilanie elektryczne poprowadzone kablem typ 3Cx2,5mm², zabezpieczone bezpiecznikiem 10A i bezpiecznikiem różnicowym 30mA. Przyłącze elektryczne powinny być zakończone gniazdkiem zamontowanym na ścianie.


4. proponujemy – jako dodatkowe zabezpieczenie – doprowadzić kabel ekwipotencjalny uziemiający typ CY 6 mm² wyprowadzając go pod pulpitem wanny z zapasem 1 m nad podłogę
5. Ze względów bezpieczeństwa każda wanna musi być wyposażona w oddzielny wyłącznik awaryjny. Skrzynka wyłącznika mocowana jest na ścianie w pobliżu wanny. Należy na ścianie, którą przebiega przyłącze elektryczne wanny, wyprowadzić gniazdko 230 V - 70 cm od najbliższego źródła wody.

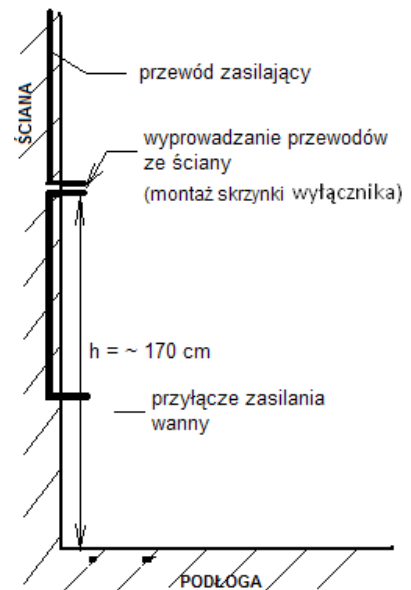


Przygotowanie odpływu w wannach do hydroterapii

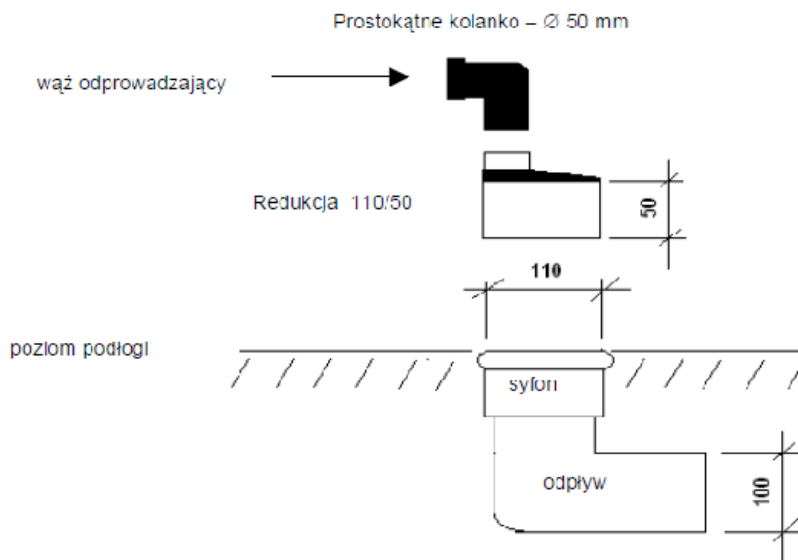

Rys. 2 PLAN MONTAŻOWY – AQUANESIS BP

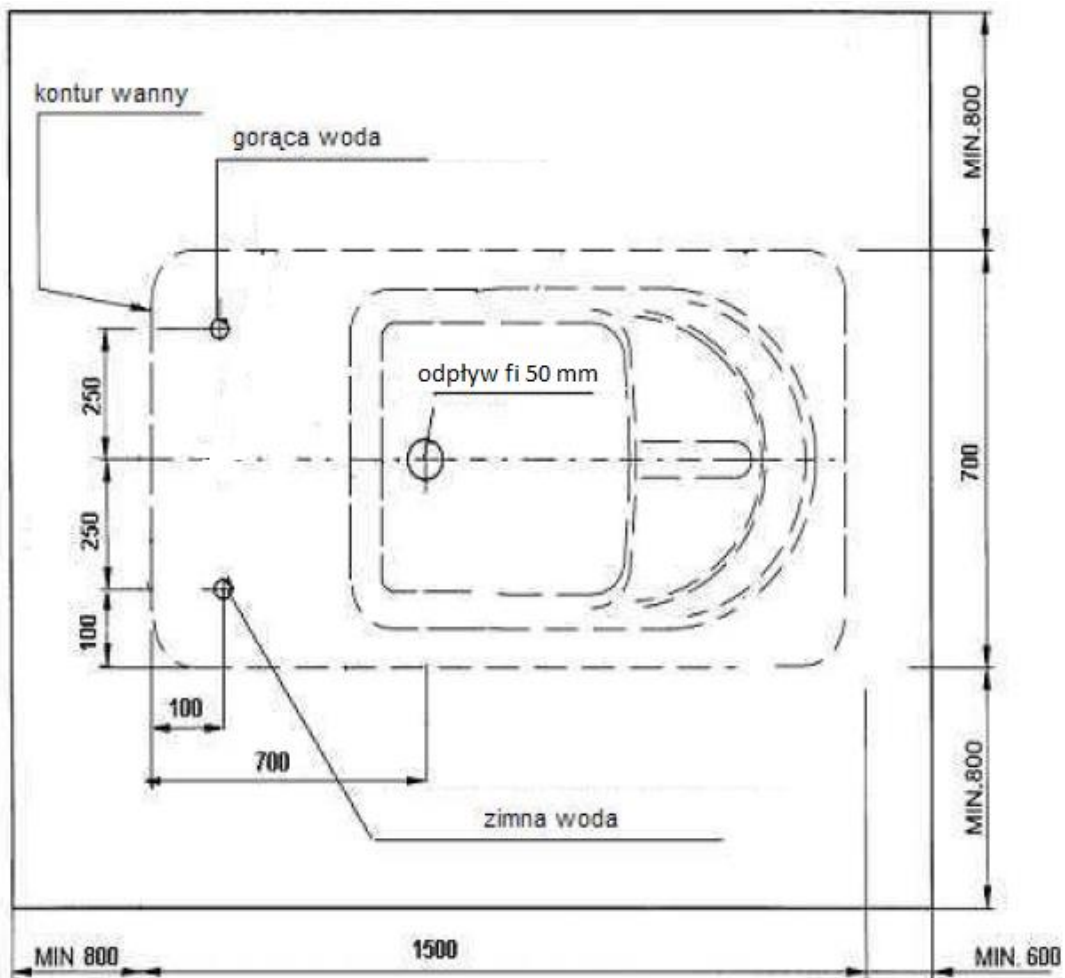

Rys. 4 Schemat podłączenia wanny do sieci

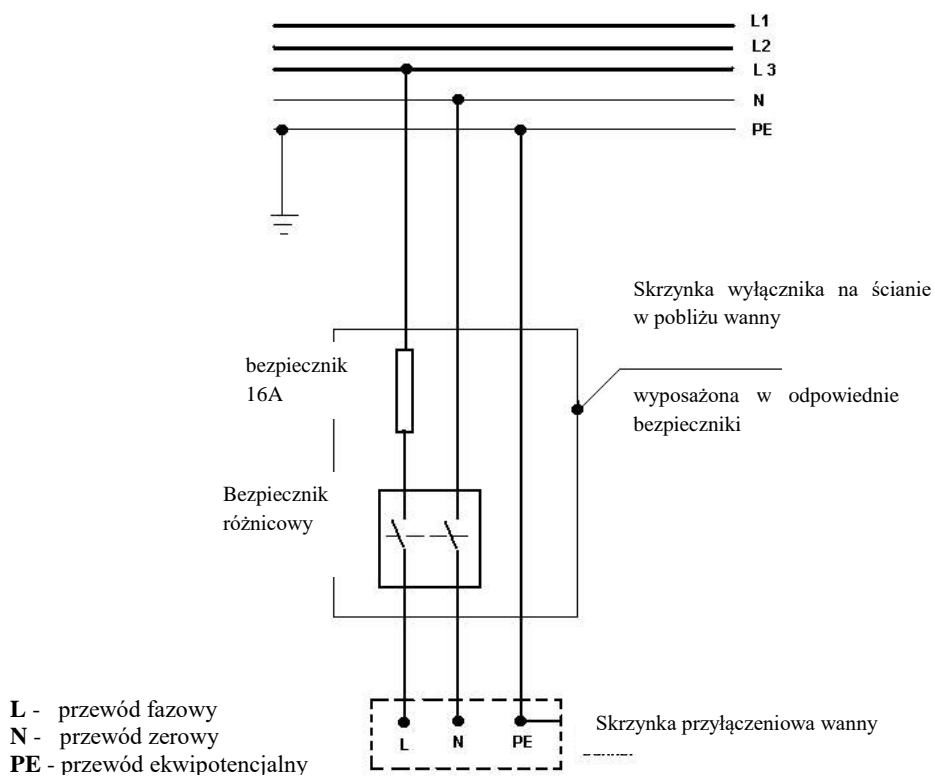

.....
miejsowość, data

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE / ZLECENIE MONTAŻU *)

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień przy montażu oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się dokładnie z dokumentacją techniczną wanny przekazaną nam przez firmę Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta
- zostaliśmy poinformowani, że darmowy montaż urządzeń dotyczy tylko i wyłącznie standardowego podłączenia ich do istniejących, wykonanych we własnym zakresie przez nabywcę, przyłączy wodno - kanalizacyjnych zgodnych ze specyfikacją techniczną,
- wszystkie przyłącza przygotowaliśmy zgodnie z w/w dokumentacją,
- pomieszczenie z gotowymi przyłączami możemy udostępnić ekipie montażowej od dnia od godz.,
- w przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności montażowych, niezgodności przyłączy z w/w dokumentacją techniczną poniesiemy wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym i przedwczesnym przyjazdem oraz czasem pracy ekipy montażowej.

W celu ustalenia dokładnego terminu i warunków instalacji urządzenia wyznaczamy do kontaktu z Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta:

.....
imię i nazwisko osoby kontaktowej

.....
nr telefonu kontaktowego

.....
pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej

* Montaż będzie możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu podpisanego oświadczenia.

Proszę wypełnić dokument i odesłać faksem na nr 13 42 500 22 lub mailem: biurokinesis@kinesis.com.pl .