

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/artromot-sp3-szyna-do-cwiczen-konczyny-dolnej-p-209.html>



ARTROMOT – SP3 Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej

Numer katalogowy	ARTROMOT – SP3
Kod producenta	ARTROMOT – SP3
Producent	ARTROMOT

Opis produktu

ARTROMOT® SP3 - Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji **stawu skokowego**. **Jedyny** aparat umożliwiający wykonywanie ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF (ruch fizjologiczny).

Wskazania:

ARTROMOT® SP3 jest przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawów skokowych oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji.

Przykłady:

- artrotomie, artroskopie połączone z synowektomią, artrolizą lub innymi zabiegami wewnątrzstawowymi,
- zaopatrzone operacyjnie złamania i pseudoartrozy,
- wszelkie operacje odtworzeniowe (z możliwością ćwiczeń),
- ingerencje tkanek miękkich w obrębie stawu skokowego,
- operacje chrząstki stawowej rekonstrukcje ścięgna achillesa.

ARTROMOT® SP3 zapewnia ruch zgodny z fizjologią stawu według wzorców PNF. ARTROMOT® SP3 steruje się pilotem graficznym z dużym wyświetlaczem, a obsługa menu przy użyciu ikon jest łatwa i intuicyjna. Dzięki temu programowanie jest teraz jeszcze łatwiejsze. ARTROMOT® SP3 to maksymalna ergonomia, łatwa regulacja umożliwiająca ćwiczenia w pozycji siedzącej i leżącej z pełnym dostosowaniem do wymiarów kończyny pacjenta, a także prosta dezynfekcja.

Zalety:

- ruch fizjologiczny: dzięki w pełni zsynchronizowanym silnikom ARTROMOT® SP3 umożliwia ruchy:
- zgodne ze zgięciem grzbietowym i podeszwowym w górnym stawie skokowym,
- odwrócenia i nawrócenia w dolnym stawie skokowym,
- PNF (kombinacja w/w),
- uniwersalność: stosowanie na lewej i prawej kończynie dolnej,

-
- pilot kontrolujący: prosta obsługa przy pomocy pilota z symbolami obrazkowymi,
 - karta chip: zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta,
 - ergonomia: pełne dostosowanie do wymiarów anatomicznych pacjenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wariant ARTROMOT-SP3: ARTROMOT-SP3 Standard , ARTROMOT-SP3 Standard chip , ARTROMOT-SP3 Comfort , ARTROMOT-SP3 Comfort chip

Dane techniczne

Dane techniczne:

Wymiary:

Masa: 11 kg

Wymiary zewnętrzne: 78 x 42 x 39,5 cm

Wersje:

ARTROMOT-SP3 Standard

ARTROMOT-SP3 Standard chip

ARTROMOT-SP3 Comfort

ARTROMOT-SP3 Comfort chip

Zakresy ruchu:

Zgięcie podeszwowe/grzbietowe: 50°/0°/40°

Inwersja/ewersja odwrócenie/nawrócenie): 40°/0°/20°

Funkcje ARTROMOT-SP3 Standard

Funkcje wersji ARTROMOT-SP3 Standard:

Czas ćwiczenia: 1 - 59 min / 1 - 24 h / praca ciągła

Pauzy: 0 - 59 s

Prędkość: 5% - 100%

Autorewers przy oprze (silnik A i B oddzielnie): 1 - 25 poz.

Sterownie silnikami A i B: włączony/wyłączony - umożliwia ruchy izolowane

Tryb synchroniczny/asynchroniczny:

-
- Synchroniczny: ruch prowadzony wg wzorców PNF
 - Asynchroniczny: losowo generowane kombinacje ruchowe w określonych zakresach ruchu

Łączny czas terapii: zapis całkowitego czasu terapii pacjenta

Nowy pacjent: zresetowanie ustawień pilota przed nowym pacjentem

Pozycja transportowa: przygotowanie do zapakowania i transportu

Blokada klawiatury: zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii

Menu serwisu

Funkcje wersji ARTROMOT-SP3 Comfort:

Program stretchingu: delikatne rozszerzanie zakresu ruchu oddzielnie: zginania podszwowego, zginania grzbietowego, inwersji, ewersji

Dokumentacja terapii: zapis wyników ćwiczeń w formie wykresów oddzielnie dla zginania podszwowego/grzbietowego i dla inwersji/ewersji

Program rozgrzewki: stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu

Program izolacji: separowanie, naprzemienne ruchy zginania lub in-/ewersji

Funkcje wersji ARTROMOT-SP3 z kartami chip:

Karta Chip pacjenta: zachowanie indywidualnych danych terapii pacjenta