

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/elektrody-punktowe-do-adaptera-p-551.html>

Elektrody punktowe do adaptera



Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Elektrody punktowe do adaptera
Producent	ASTAR

Opis produktu

Elektrody punktowe są stosowane przy okazji zabiegów elektroterapii.

Tego typu elektrody są stosowane wszędzie tam gdzie następuje konieczność ograniczenia powierzchni działania prądu. Oferowane przez nas **elektrody punktowe** są wykonane z materiałów zgodnych z dyrektywą ROHS 2011/65/UE w szczególności zgodnie z wymaganiami materiałowymi detali, które mają kontakt z ciałem pacjenta.

Rodzaje prądów, przy których są stosowane zestawy elektrod punktowych:

Pracując z **elektrodami punktowymi** korzystamy z następujących rodzajów prądów:

- Jednokierunkowych trójkątnych
- Jednokierunkowych eksponencyjnych
- Jednokierunkowych prostokątnych
- Prądów TENS
- Prądów interferencyjnych
- Mikroprądów (specjalna technika z użyciem dwóch elektrod punktowych)
- Prądu HV

Elektrody punktowe - zastosowanie:

Elektroda punktowa znajduje zastosowanie w:

- elektrodiagnostyce pobudliwości nerwowo-mięśniowej
- elektrostymulacji mięśni odnerwionych, szczególnie małych mięśni twarzy
- lokalizacji stref przeczulicy
- lokalizacji punktów motorycznych

-
- lokalizacji punktów spustowych
 - lokalizacji punktów akupunkturowych
 - terapii trudno gojących się ran

Elektrody punktowe - metodyka zabiegu:

Zabiegi, przy okazji których stosowane są **elektrody punktowe** przeprowadzamy w trybie CV (constant voltage).

Elektroda punktowa jest podłączana do jednego odprowadzenia kanału zabiegowego, a do drugiego odprowadzenia podłącza się elektrodę mocowaną na stałe na ciele pacjenta. Jeżeli wykonujemy zabiegi za pomocą prądów unipolarnych **elektroda punktowa** zawsze będzie biegunem ujemnym (katodą).

Przy zabiegu z użyciem prądów jednokierunkowych **elektroda punktowa** powinna być zakończona podkładem gąbkowym lub z gazy. Podkład nie powinien zwiększać jej powierzchni. Przy zabiegach prądami dwukierunkowymi należy używać żelu przewodzącego.

Należy pamiętać, że po każdym wykonanym zabiegu **elektrody punktowe** powinny zostać oczyszczone i zdezynfekowane przed umieszczeniem ich na powrót w kuferku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: 6 mm , 10 mm , 15 mm (+ 5,00 zł) , 20 mm (+ 10,00 zł)

Akcesoria dodatkowe: Brak , Adapter do elektrod punktowych (+ 60,00 zł)